


IDEEL PREPARERING FOR HELKERAMISKE- ZIRCONIA RESTAURERINGER

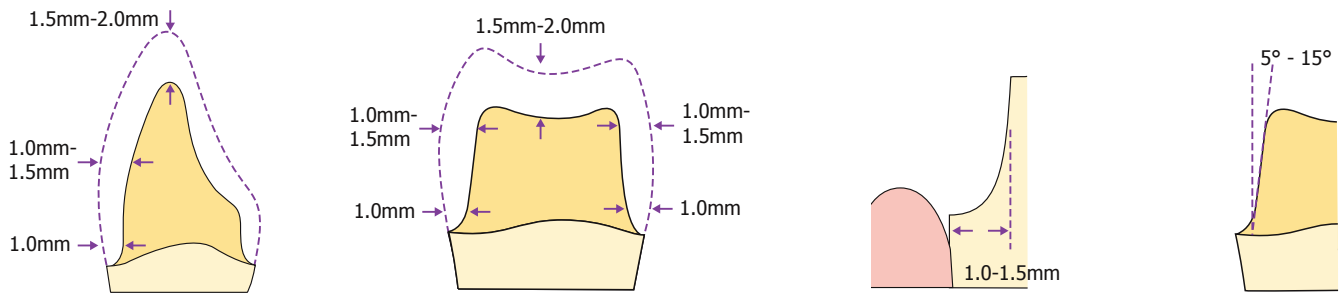


En ideell preparering skal være en dyp chamfer eller en sirkulær skulder preparering uten skarpe kanter eller uregelmessige groper. For å oppnå best resultat reduseres den anatomiske formen etter angitt minimumstykkelse.



Prepareringen deles inn i tre plan:

- Reduser den incisale/okklusale tredel av kronen med 1,5mm - 2,0mm.
- Reduser den midtre tredel av kronen med 1,0mm - 1,5mm.
- Reduser den gingivale tredel av kronen med 1,0mm.

FEIL

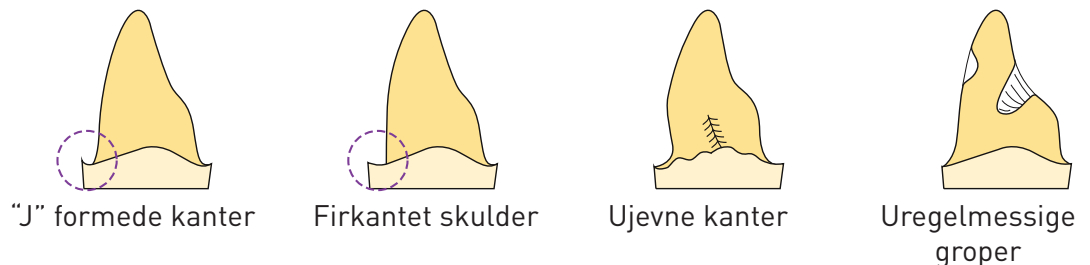


UNNGÅ

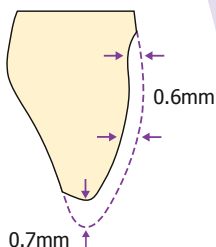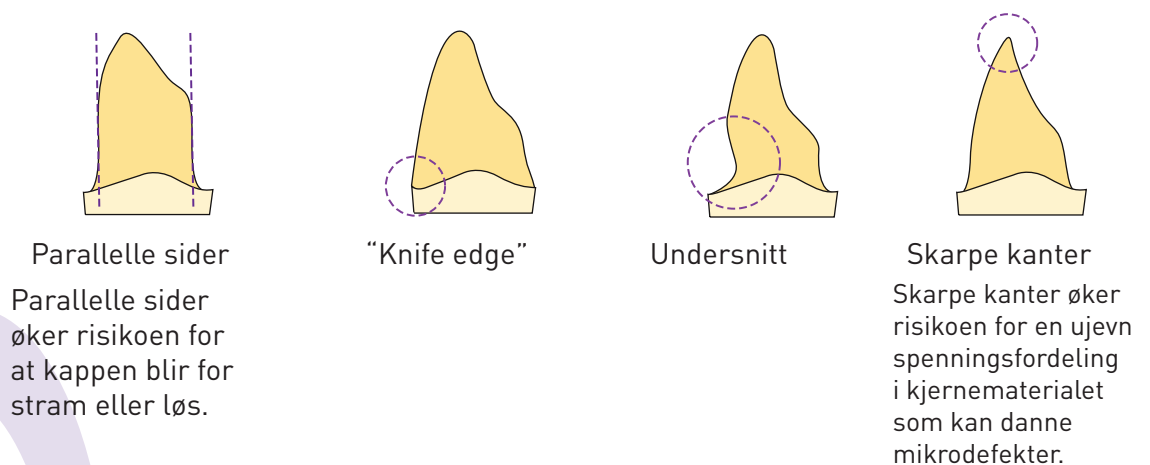


Fasetter

- $\leftarrow$ 0,6 mm labial og mis fargede tenner må slipes mere cervical reduksjon avhengig av ønsket translucens
- $\leftarrow$ 0,7 mm incisal reduksjon

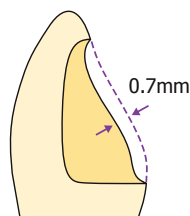

Maryland Bridge

- 0,5-0,7 mm lingual reduksjon
- Preparasjon skal kun være i emalje, ikke dentin
- Bruk av retensjons elementer som slippede groper, fure og hull kan anbefales

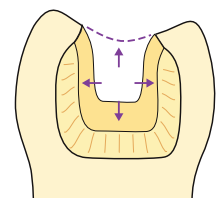

Innlegg/Onlay

- $>1,5$ mm preparasjonsdybde
- $>1,5$ mm "isthmus" bredde
- 6° konvinkel på sidevegger
- Approssimal boks skal ha divergerende vegger